

負壓溫灸儀器

Far Infrared Heat Vacuum Therapy



KJX

康健欣生化科技有限公司
Kang Jian Xin International Co.,LTD

各部件名稱與配件

主機

1. 儀器主機
2. 操作面板
3. 連接孔
4. START / STOP
5. 總開關



配件

1. 電源線
2. 滾輪把手 (大)
3. 滾輪把手 (小)
4. 斗笠探頭 (附加配件)



使用方法

1. 將電源線插上
2. 將把手線插上
3. 開啟電源開關
4. 選定作用部位
5. 設定溫度
6. 設定時間
7. 設定吸放時間
8. 按下START
9. 開始療程




面板介紹

一、START / STOP 開始與停止按鈕

* STOP 狀態：燈滅

* START 狀態：燈恆亮

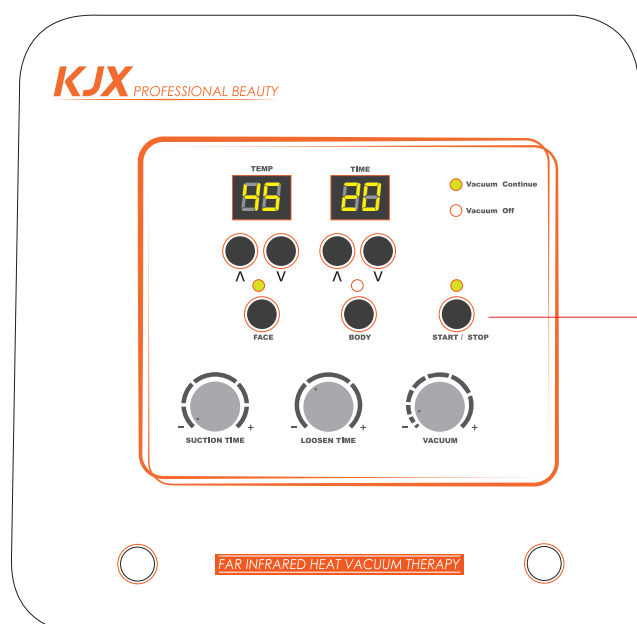


* 開機處於STOP 狀態，按一次
開啟START狀態，再按一次則
回復 STOP 狀態選擇部位按鍵

面板介紹

二、溫度顯示 / TEMP [^] [v] 溫度選擇按鍵

- * ^ 溫度往上調整1度，若持續按著不放可自動遞增
- * v 溫度往下調整1度，若持續按著不放可自動遞減

二、溫度顯示器
*開機預設45度
[最低30度 ~ 最高70度]

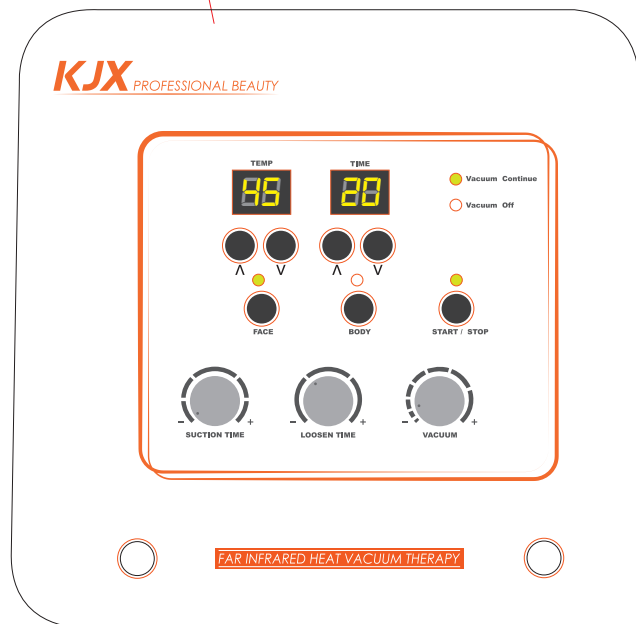

面板介紹

三、時間顯示 / TIME [^] [v] 時間選擇按鍵

* 當計時至1分鐘以下時將以秒顯示。

* 當計時終了時將發出3聲，同時進入STOP狀態，然後時間恢復20分。


* ^ 時間往上增加1分鐘，若持續按著不放可自動遞增(START 後無法調整)

* v 時間往上減少1分鐘，若持續按著不放可自動遞減(START 後無法調整)

三、時間顯示器

*開機預設20分鐘

[最低1分鐘 ~ 最高60分鐘]

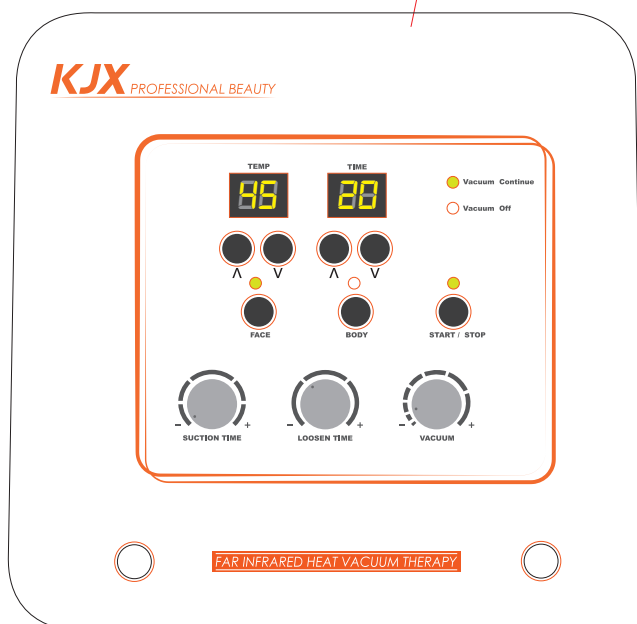

面板介紹

四、持續指示燈，當吸的VR順時鐘方向轉到底此燈將亮起。


五、關閉指示燈，當吸的VR逆時鐘方向轉到底此燈將亮起。

六、模式指示燈，分別有 Face、Body。開機預設為 Face 亮。

七、吸氣 VR 調整旋鈕

八、放氣 VR 調整旋鈕

九、吸力 VR 調整旋鈕

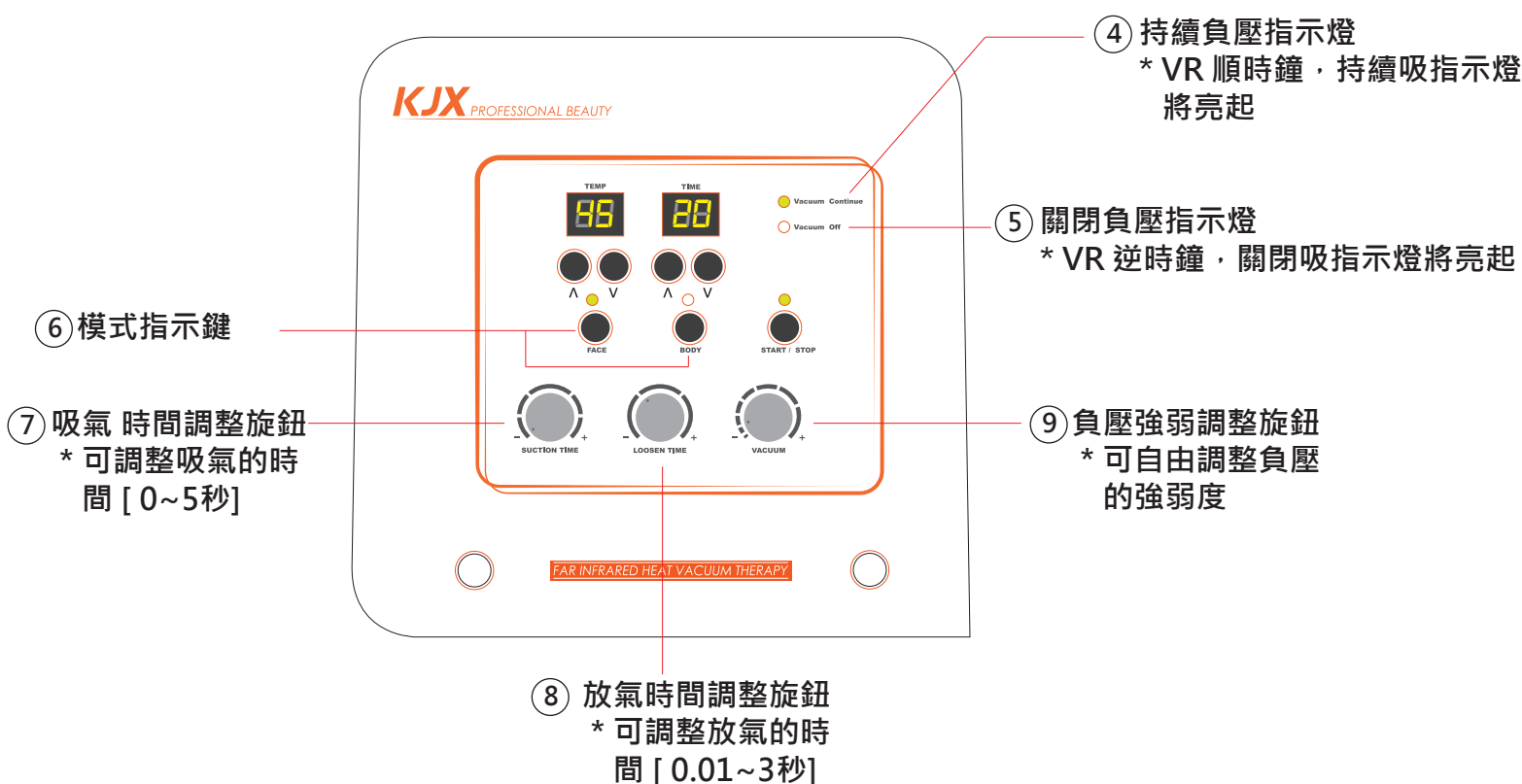


操作方式

操作流程:

重點彩妝清潔 - 全臉卸妝 - 泡沫清潔 - 面紙將全臉擦乾 - 將**精油**摸在肌膚上 - 再開始儀器操作 - 用食指及拇指將皮膚撐開 - T字區開始操作 - 由下巴開始 - 鼻子 - 額頭直線狀 - U字區 - 側面臉頰 - 螺旋狀及拉長線條 - 眼周採定點重疊半圈 - 全臉走過一次後 - T字區再次加強 - (結束儀器操作) 開始讓客戶做比較前後或左右的差異性。



儀器操作流程：

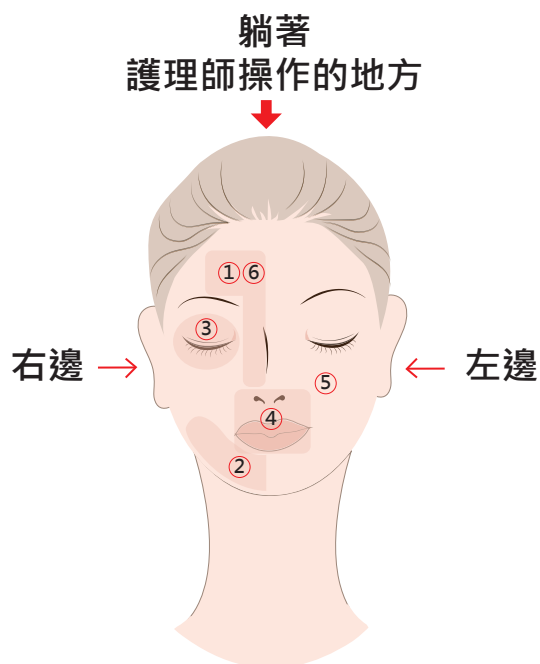


每一次的療程一開始先做半張臉，這樣才可以比對前後的差異。一開始，可以先從右臉開始做起，做完了右臉再做左臉，最後再全臉走一次，這樣才能結束整個過程。

- 第一步：T字區操作
- 第二步：U字區操作
- 第三步：眼周部位操作
- 第四步：嘴角部位操作
- 第五步：全臉走一次
- 第六步：加強T字區操作

操作方式



臉部操作法 [1]

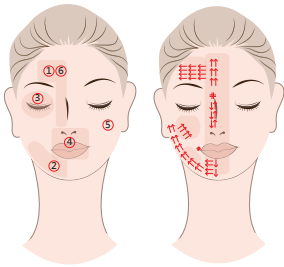

- * 鏈子狀點法 - 是指相疊面，是撐開走直線而且不能間隔。
- * 先從左臉區(操作師角度)開始操作，以箭頭的方向進行操作。



臉部操作法 [2]

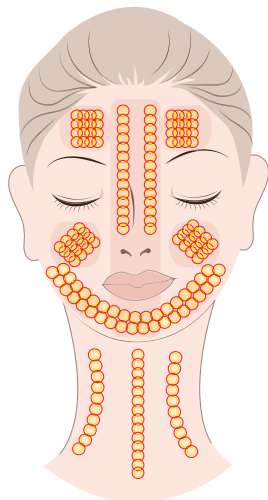
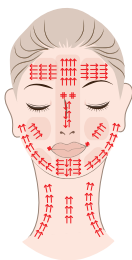


- * 鏈子狀點法 - 是指相疊面，是撐開走直線而且不能間隔。
- * 左臉 (操作師角度) 結束後，再開始右臉的步驟。



操作方式

臉部操作法 [3]

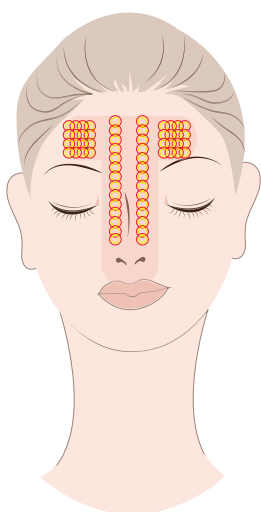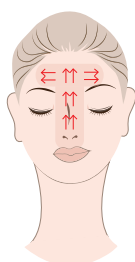

- * 鏈子狀點法 - 是指相疊面，是撐開走直線而且不能間隔。
- * 全臉走過一次後，最後再加強一次T字區。



頸部操作法




- * 鏈子狀點法 - 是指相疊面，是撐開走直線而且不能間隔。
- * 全臉走過一次後，最後再加強一次T字區。



操作方式

背部操作法

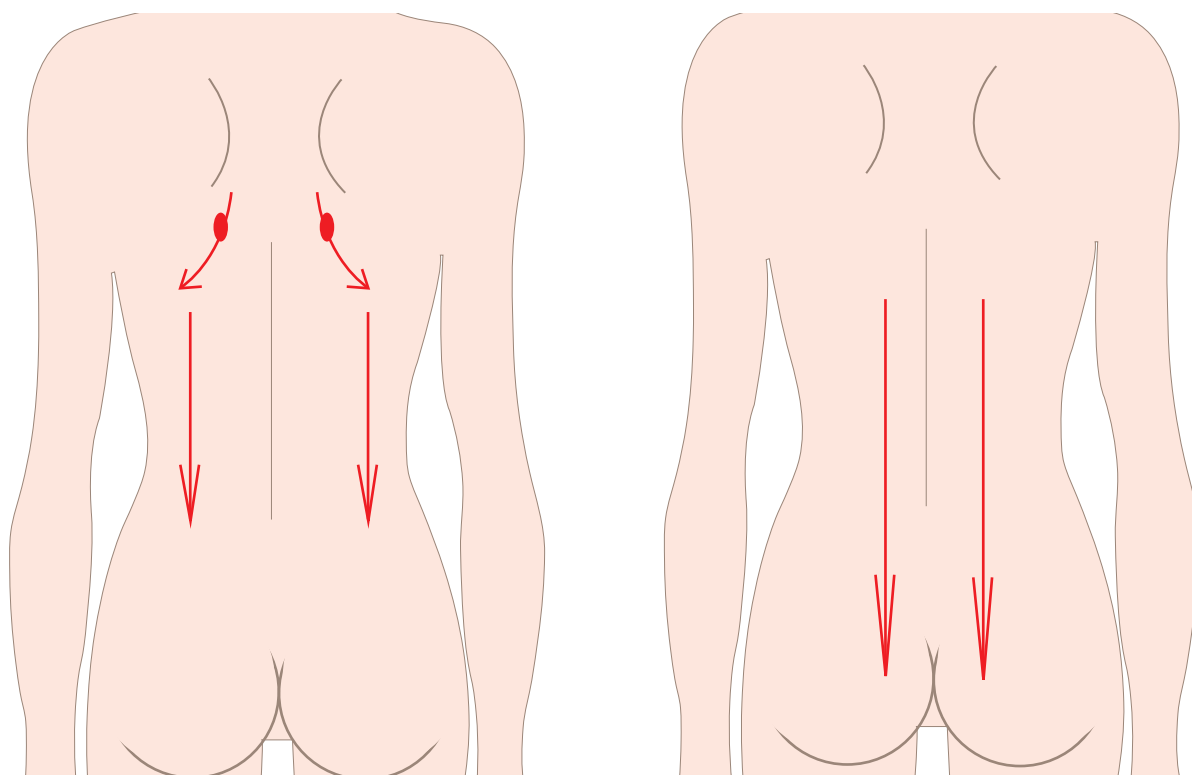


- * 鏈子狀點法 - 是指相疊面，是撐開走直線而且不能間隔。
- * 沿肩胛骨由上而下滑順地輕刮之。然後身體平躺，並將把手輕輕再背上推。
- * 沿腰椎兩側往下輕滑，以強化膀胱經及腎俞。



操作方式

手臂和全腿部操作法

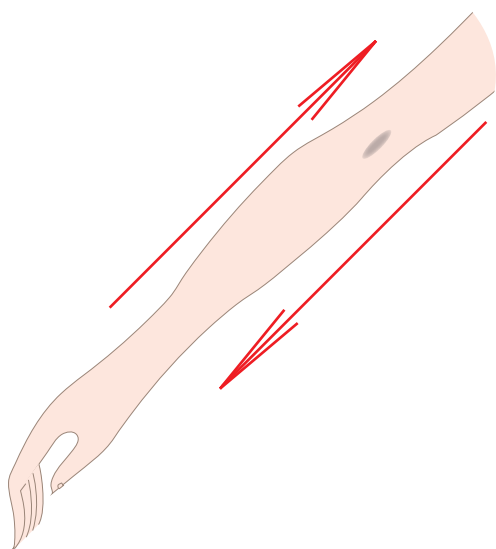


四肢 - 手臂

從手臂內側由上往下推至手腕，再沿手臂外側由下往肩部推上來。



四肢 - 全腿部


從足踝往上輕推至鼠蹊部，再沿大腿外側往下滑。

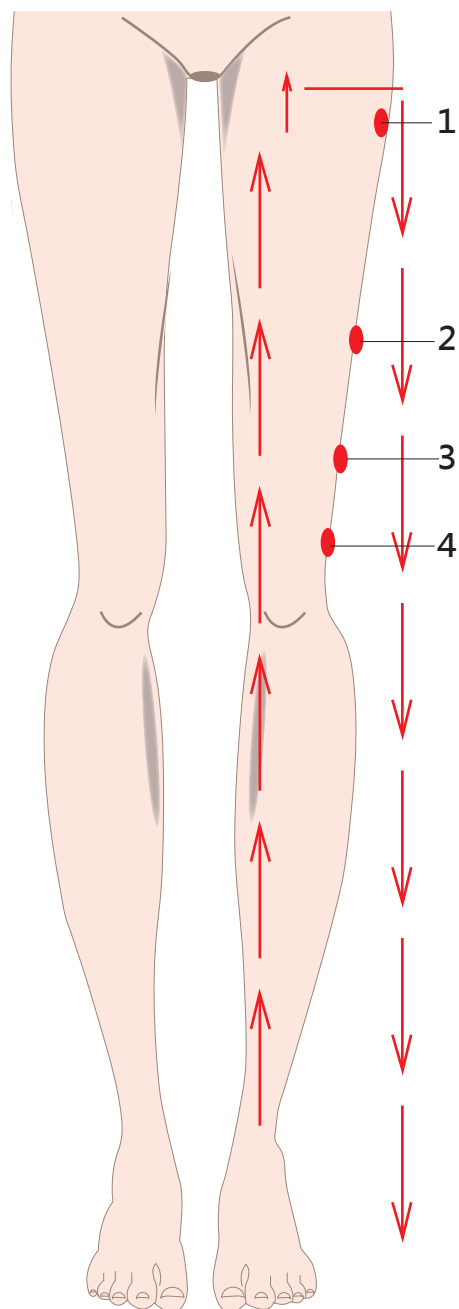

安裝方式說明

1. 滾輪把手頭(小)對應Face孔位插上 / 可替換斗笠探頭

2. 滾輪把手頭(大)對應Body孔位插上

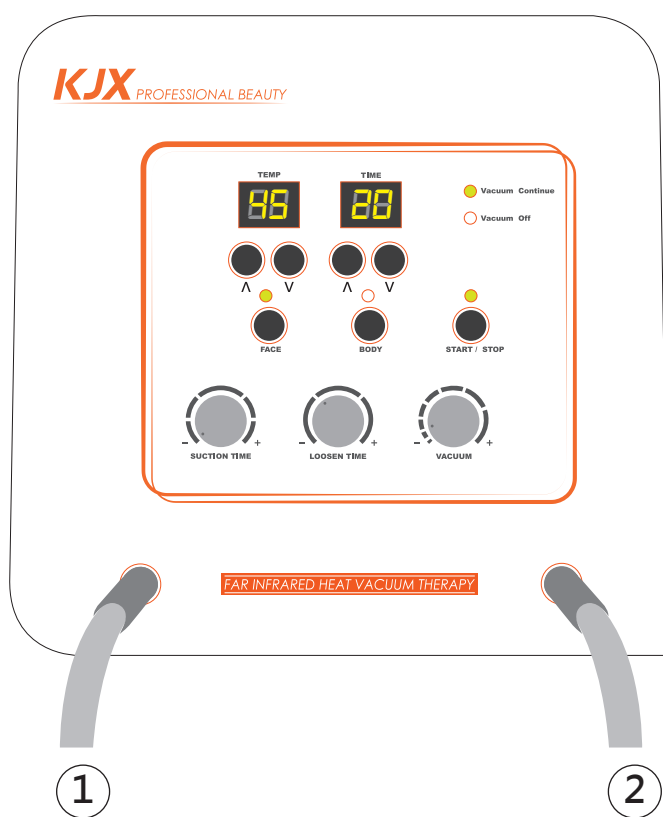

① 滾輪把手
(小)
Face



② 滾輪把手
(大)
Body



附加配件：
斗笠探頭
Cap Probe



使用後事項

清潔方法

* 每次使用後均應清潔主機、把手探頭，平時應維持本產品的清潔。

* 清潔前請先關閉主機總電源並從插座上拔除電源線

1. 主機清潔:

使用乾布或微濕毛巾將主機擦拭乾淨。

2. 把手探頭清潔:

使用乾布或微濕毛巾將把手探頭上精油或髒汙擦拭乾淨

* 把手探頭請勿使用有機溶劑或酒精擦拭

3. 油杯的清潔方式:

* 使用中性清潔劑清潔油杯

存放方法

每次使用完畢，清潔完後，並將儀器妥善收納

請確實將把手置於置把架，請避免讓導線纏繞

請勿放置於火源附近、陽光曝曬下或浴室等潮濕地方

請把本機收納於兒童無法觸及的地方

注意事項

請勿擅自拆解本產品，避免發生危險

切勿摔落或撞擊本產品，這可能會引起故障

清理本產品時，請勿直接用水沖洗，或使用含有機溶劑的清潔劑，避免造成本產品故障

請勿在高溫、潮濕、陽光直射之場所使用或放置本產品，避免發生故障及危險

若儀器發生故障，應洽原購買店家詢問，請勿自行維修

被操作者禁忌症

1. 惡性腫瘤、急性炎症、局部出血、血栓性靜脈炎、活動性肺結核、肌肉萎縮側索硬化症、多發性硬化的進展惡化期靜動脈竇部位，裝有心臟起搏器，體內植入型電子醫療器材及不適應電刺激者不要使用本產品心臟區及太陽穴部位，不許作為刺激區
2. 血壓異常（180mm Hg以上）、孕婦、感覺神經異常者、惡性腫瘤患者、皮膚異常敏感、感染性疾病、發燒38度以上、多發性硬化的進展惡化期、頸動脈竇部位（惡性腫瘤），嚴重心臟病患者禁用。在人體口內、眼部、會陰部、皮膚外傷患處、請勿使用本產品
3. 請勿與其他儀器或敷藥同時使用
4. 請勿使用於有癲癇狀況之患者
5. 請勿使用於腦區、喉部或咽喉部肌肉
6. 請勿使用於未經診斷或不明原因之疼痛

注意事項

請勿擅自拆解本產品，避免發生危險

切勿摔落或撞擊本產品，這可能會引起故障

清理本產品時，請勿直接用水沖洗，或使用含有機溶劑的清潔劑，避免造成本產品故障

請勿在高溫、潮濕、陽光直射之場所使用或放置本產品，避免發生故障及危險

若儀器發生故障，應洽原購買店家詢問，請勿自行維修

不宜使用範圍

傳染病患者

裝置心臟節律器患者

皮膚發生異常狀況，例如有傷口、潰爛、發炎...等

本機操作發生異常時，可先參照 [排除故障] 部分進行檢查。
如仍無法解決，請向當地代理商諮詢。

排除故障	
狀況	可能原因 / 解決方法
無法啟動	請檢查是否有確實安裝電源線並插上電插座 請按下電源總開關開起電源
使用時把手頭沒有熱	請檢查線組連結端是否與主機連接孔確實連接 是否有故障代碼出現
故障代碼	E1 > Face 線頭未插入或損壞 E2 > Body 線頭未插入或損壞

產品規格

型 號 : TKP-C103

輸入電壓 : 110V ~ 220V

消耗功率 : 50W

本體體積 : 30cm * 45cm * 27cm [長*寬*高]

- 滾輪把手(大)探頭面積 85mm
- 滾輪把手(小)探頭面積 50mm
- 斗笠探頭面積 40 mm

本體重量 : 11.91Kg

產 地 : 台灣

製 造 商 : 康健欣生化科技有限公司

網 址 : www.bio-kjx.com

信 箱 : service@bio-kjx.com

地 址 : 新北市新北產業園區五權七路52號4樓

電 話 : 02-2298-9358 傳 真 : 02-2298-9359