


中頻溫灸儀

使用說明書



KJX
KANG JIAN X I N


康健欣生化科技有限公司
KANG JIAN XING INTERNATIONAL CO.,LTD

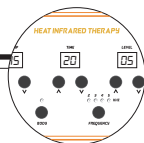

各部件名稱與配件


主機


1. 儀器主機
2. 操作面板
3. 臉部把手連接孔 7Pin
4. 身體把手連接孔 6Pin
5. 導電手套連接孔
6. 臉部把手置把架
7. 身體把手置把架
8. 三合一開關

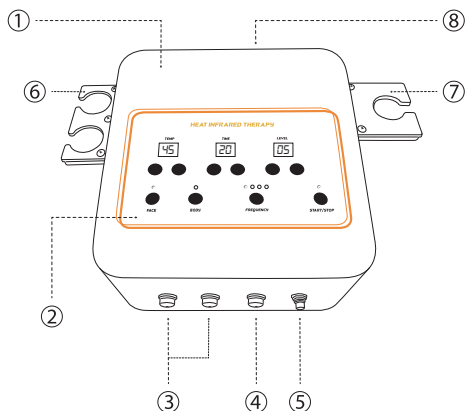

配件

1. 電源線
2. 臉部把手 (FACE) *2
3. 臉部把手連接線 7Pin*2
4. 身體把手 (BODY) *1
5. 身體把手連接線 6Pin*1
6. 導電手套 (選配)
7. 導電手套連接線 (選配)

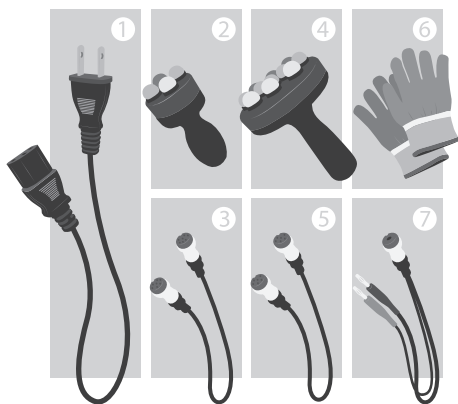

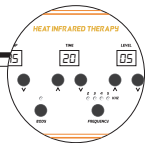

安裝方式說明

把手組裝


1. 臉部把手 (7Pin) 與其連接線 (7Pin) 組裝
2. 身體把手 (6Pin) 與其連接線 (6Pin) 組裝



※注意※
臉部把手為7Pin





※注意※
身體把手為6Pin

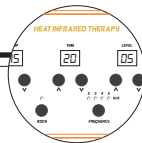

安裝方式說明


1. 臉部把手對應FACE孔位
2. 身體把手對應BODY孔位
3. 將電源線與主機電源插孔連接，並將插頭接上電源插座

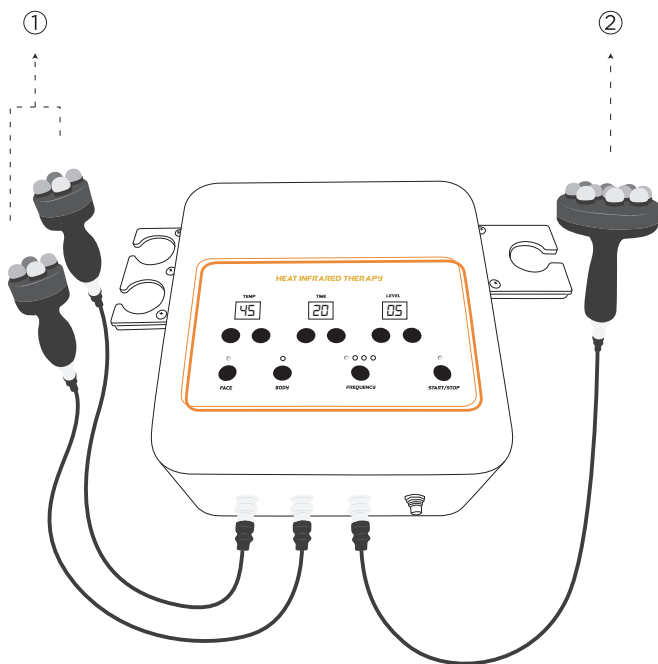

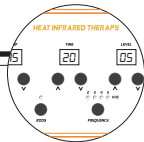

使用方式


1. 將電線插上
2. 開啟電源開關
3. 設定時間
4. 選定作用部位 (FACE模式 / BODY模式)
5. 設定溫度
6. 設定頻率
7. 設定電流強度
8. 按下START
9. 開始運作

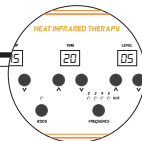

面板介紹

一、START / STOP 開始與停止按鈕

STOP狀態：滅燈 START狀態：燈恆亮

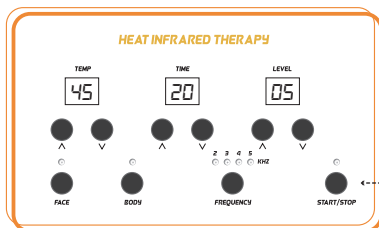


開機處於STOP狀態
按一次開啟START狀態
再按一次則恢復STOP狀態


二、模式選擇

選擇FACE模式時，FACE指示燈會亮
(FACE的兩隻把手探頭會同時運作)

選擇BODY模式時，BODY指示燈會亮

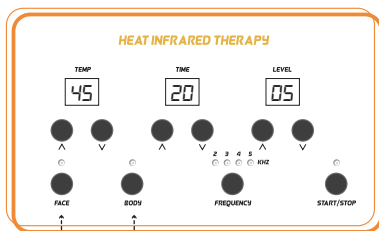

一次只能使用一種模式

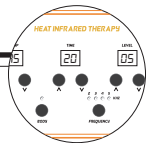

面板介紹

三、TIME 時間顯示 ^ V 時間選擇按鈕


^ 時間往上調整，若長按不放可自動遞增（START後無法調整）


V 時間往下調整，若長按不放可自動遞減（START後無法調整）

當計時至1分鐘以下時以秒顯示

當計時終了時將發出3聲，同時進入STOP狀態，時間恢復為20分鐘

開機預設20分鐘（最低1分鐘，最高60分鐘）

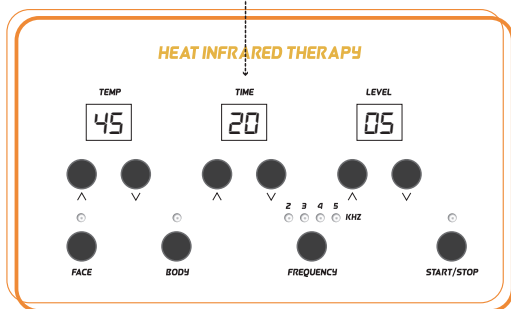

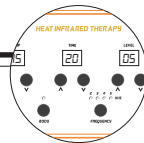


面板介紹


四、LEVEL 電流強弱控制 \wedge \vee 電流強弱選擇按鈕

\wedge 強度往上調整，若長按不放可自動遞增

\vee 強度往下調整，若長按不放可自動遞減

強度選擇最低為1，最高為10

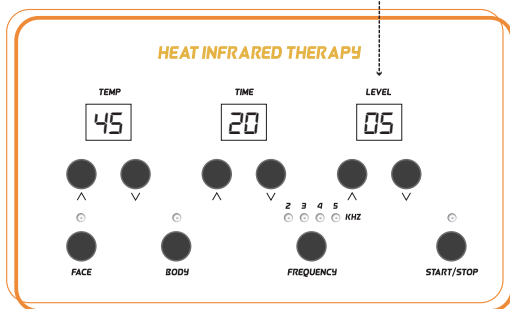

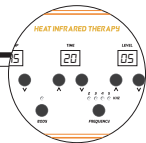



面板介紹

五、FREQUENCY 頻率調整

點擊頻率調整按鈕可更改頻率 (START後無法調整)

由深層至淺層依序為2、3、4、5KHz

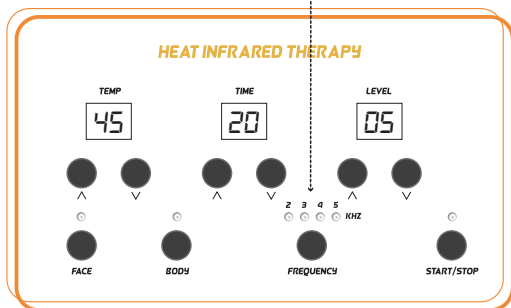

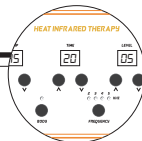

使用後事項

清潔方法

※每次使用後均應清潔主機、把手探頭，平時應維持本產品的清潔

※清潔前請先關閉主機總電源並從插座上拔除電源線

1. 主機清潔：

使用乾布或微濕毛巾將主機擦拭乾淨

2. 把手探頭清潔：

使用乾布或微濕毛巾將把手探頭上的精油或髒汙擦拭乾淨

※把手探頭請勿使用有機溶劑或酒精擦拭

※初次使用時，擦拭手把會有黑色粉末為正常現象


存放方法

1. 每次使用完畢、清潔完後，請將儀器妥善收納

2. 請確實將把手置於置把架，避免讓導線纏繞


3. 請勿放置於火源附近、陽光曝曬下或浴室等潮濕的地方

4. 請將本機收納於兒童無法觸及的地方

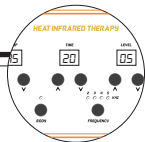

注意事項


1. 請勿擅自拆解本產品，避免發生危險
2. 請勿摔落或撞擊本產品，避免引起故障
3. 清理本產品時，請勿直接用水沖洗，或使用含有有機溶劑的清潔劑，避免造成故障
4. 請勿在高溫、潮濕、陽光直射之場所使用或放置本產品，避免發生故障及危險
5. 若儀器發生故障，應洽原購買店家詢問，請勿自行維修

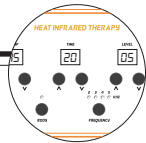

注意事項


被操作者禁忌症

1. 惡性腫瘤、急性炎症、局部出血、血栓性靜脈炎、活動性肺結核、肌肉萎縮側索硬化症、多發性硬化的進展惡化期靜動脈竇部位，裝有心臟起搏器，體內植入型電子醫療器材及不適應電刺激者不要使用本產品心臟區及太陽穴部位，不許作為刺激區
2. 血壓異常（180mm Hg以上）、孕婦、感覺神經異常者、惡性腫瘤患者、皮膚異常敏感、感染性疾病、發燒38度以上、多發性硬化的進展惡化期、頸動脈竇部位（惡性腫瘤），嚴重心臟病患者禁用。在人體口內、眼部、會陰部、皮膚外傷患處、請勿使用本產品
3. 請勿與其他儀器或敷藥同時使用
4. 請勿使用於有癲癇狀況之患者
5. 請勿使用於腦區、喉部或咽喉部肌肉
6. 請勿使用於未經診斷或不明原因之疼痛

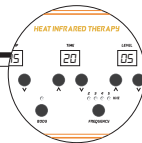

本機器操作發生異常時，可先參照「排除故障」部分進行檢查
仍無法解決，請向當地代理商詢問

排除故障	
狀況	可能原因 / 解決方法
無法啟動	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請檢查是否有確實安裝電源線並插上電插座 2. 請按下電源總開關開啟電源
使用時 把手頭沒有熱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請檢查線組連接端是否與主機連接孔確實連接 2. 是否有故障代碼出現
故障代碼	<p>E1> FACE線頭未插入或損壞</p> <p>E3> BODY線頭未插入或損壞</p>

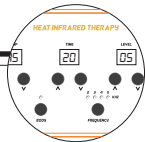

保證書

請詳填保證卡資料，並妥善保存。

承蒙惠顧，不勝感激，為維持您的權益，應即請經銷商填寫購買日期並蓋店章。

顧客姓名				電話	
地址					
產品名稱				型號	
購買日期	年	月	日	保證期限	自購買日起保證一年
備註					
經銷商 蓋店章					

1. 本保證書係購買本公司製品交付顧客做為日後需要服務時提示之用。
2. 本保證書各欄均需確實填寫，並請經銷商蓋妥店章後才有效。
3. 產品售出後，於保證期限內，若因製造商原因或材質不良引起之故障，保證免費予以修復或更換零件。
4. 有效期限內發生下列情況者，本公司得酌收材料工本費：
 - 使用不當或使用環境特殊者。
 - 因天災地變、鼠禍蟲害所導致者。
 - 安裝後自行移動或運輸所引起的故障者。
 - 自行改裝、變造或拆卸所造成者。
 - 供電系統失誤或不符合產品之電壓週率導致者。
5. 遇下列情形本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者或未出示保證書者
 - 保證書記載模糊(非因原載造成)無法辨識或塗改者。
 - 保證書內容(機型、機號等)與現物不符者。
6. 保證書如有遺失，不予補發，敬請妥為保存。

產品規格

型號：TKP-C104

輸入電壓：110V ~ 220V

消耗功率：50W

本體體積：260mm*260mm*160mm (長*寬*高)

- 臉部把手探頭面積 48mm
- 身體把手探頭面積 92mm

本體重量：4.75 kg

產地：台灣

製造商：康健欣生化科技有限公司

網址：WWW.BIO-KJX.COM

信箱：service@bio-kjx.com

地址：新北市新北產業園區五權七路52號4樓

電話：02-22989358 傳真：02-22989359